



Integracja oprogramowania Sopro Imaging z SmartDental

1. Należy skonfigurować oprogramowanie **Sopro Imaging** zgodnie z instrukcją producenta „LUSI user manual_1.03”;
 - W File > Setup... > Zakładka Main należy zaznaczyć ‘**Use LUSI for the link**’;
 - Należy wybrać **Type type SI: Number – A: „INI File name”**;
 - Należy zaznaczyć ‘**Always update the files**’;
2. Po zamknięciu oprogramowania **Sopro Imaging** na pulpicie pojawi się ikona LUSI służąca do komunikacji z oprogramowaniem SmartDental;

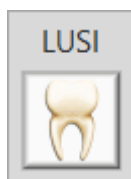

Konfiguracja LUSI

1. Aby skonfigurować LUSI do współpracy ze SmartDental, należy uruchomić Smartdental i otworzyć kartę dowolnego pacjenta;

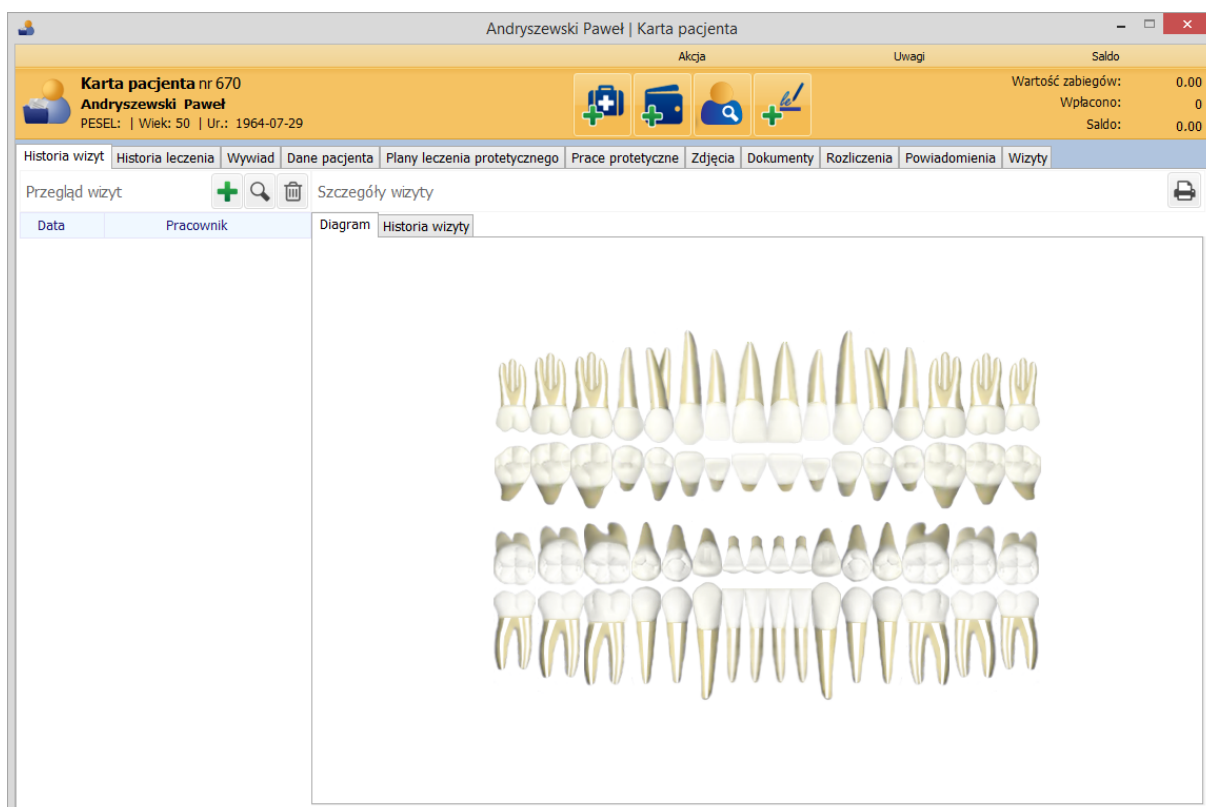

2. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonie LUSI, co spowoduje otwarcie okna konfiguracyjnego LUSI.

LUSI Settings

Number Reset

Title first name last name

Address

 National number

 Date of birth

 Phones

 Mobile

 Email

Show reduced button
 Hide control window
 Alternate mode
 Hide LUSI when the imaging software is launched

OK Cancel

- Następnie należy przeciągnąć koło znajdujące się po prawej stronie danego pola w oknie konfiguracyjnym LUSI do odpowiedniego miejsca w karcie pacjenta.

The screenshot shows a patient card for 'Andryszewski Paweł'. Red arrows indicate the following fields:

- Number**: Points to the 'Karta pacjenta nr 670' label.
- last name**: Points to 'Andryszewski'.
- first name**: Points to 'Paweł'.
- Date of birth**: Points to '1964-07-29'.

Additional visible information includes: PESEL: | Wiek: 50 | Ur.: 1964-07-29. The interface includes tabs for 'Historia wizyt', 'Historia leczenia', 'Wywiad', 'Dane pacjenta', and 'Plany leczenia protetycznego'. Below the tabs is a 'Przegląd wizyt' section with a table containing columns for 'Data' and 'Pracownik', and a 'Szczegóły wizyty' section with 'Diagram' and 'Historia wizyty' options.

The image shows a 'LUSI Settings' dialog box with the following fields and options:

- Number:** 570
- Title:** (empty)
- first name:** Paweł
- last name:** Andryszewski
- Address:** (four empty lines)
- National number:** (empty)
- Date of birth:** 1964-07-29
- Phones:** (empty)
- Mobile:** (empty)
- Email:** (empty)
- Checkboxes:**
 - Show reduced button:
 - Hide control window:
 - Alternate mode:
 - Hide LUSI when the imaging software is launched:
- Buttons:** Reset, OK, Cancel

4. Należy zaznaczyć opcję **'Hide control window'**, jeżeli nie chcemy, aby po naciśnięciu ikony LUSI pojawiało się okno potwierdzające dane pacjenta;
5. Następnie należy nacisnąć OK w oknie konfiguracyjnym LUSI.

Używanie LUSI z oprogramowaniem SmartDental

Współpraca Smartdental z oprogramowaniem Sopro Imaging opiera się na przekazywaniu danych pacjenta ze Smartdental do oprogramowania Sopro Imaging. W sytuacji kiedy w Sopro Imaging istnieje już wskazany pacjent – program Sopro otwiera się na wybranej karcie. Gdy pacjenta nie ma w bazie Sopro – zostaje utworzony nowy na podstawie danych przekazanych z oprogramowania SmartDental.

Aby otworzyć kartę pacjenta w Sopro Imaging należy otworzyć kartę pacjenta w Smartdental i nacisnąć przycisk LUSI znajdujący się na pulpicie.